

“Enlil PACS” e HBYS kullanıcı kodu ve parola ile giriş yapılır. “Enlil PACS” bilgisayarda kurulu deęilse “ENLİL PACS KURULUM” dokümanına başvurabilirsiniz.

S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi

enlil PACS  
Anadolu Röntgeni...

Kullanıcı Kodu  
Parola  
Dil Seçimi TÜRKÇE  
Adı Soyadı

Debug  
 DICOM Debug  
 Konsol Debug

Kullanım klavuzunuzu okuyunuz.

Tamam Vazgeç

CE Can Eroęlu Bilgi Sistemleri SN v2.5.32-b614 10.10.2016

Karşımıza gelen ekranda “Görüntüleme” modülünü kullanarak devam ediyoruz.

enlil PACS

S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi - ENLİL KULLANICISI

Görüntüleme Raporlama Araçlar

Yönetim Yetkilendirme Yetki Atama

v2.5.32-b614 (10.10.2016)

Şifre Deęiřtirme Çıkıř


Görüntülümeye modülünde “Hasta CD” sekmesi altında bulunan “Gözet” a tıklanır.

enliPACS - S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi - ENLİL KULLANICISI (10) - Sorgu Ekranı


The screenshot shows the enliPACS search interface. The 'Hasta CD' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, the 'Gözet' button is highlighted with a red box and an arrow. The interface includes various search filters such as 'Hasta Numarası', 'Hasta Adı Soyadı', 'Erişim Numarası', 'Doktor', 'Çalışma Açık', 'Alınan AET', 'Hızır Filtreler', 'Modality', 'Durum', 'Cinsiyet', 'İsteyen Servis', 'Doğum Tarihi', 'Çalışma Tarihi', 'Çalışma Listesi', and 'Sunucu'.

**NOT:** Gözet sekmesi aktif değilse yetki tanımlaması yapılması gerekmektedir. Otomasyon birimi ile iletişime geçebilirsiniz


Karşımıza gelen ekrandan üst dizin olarak “Bilgisayar” seçilir ve CD ‘ nin takılı olduğu CD sürücüsü seçilir ve Open butonuna tıklanır. (**NOT:** Bu işlemden önce CD nin takılı olması gerekmektedir.)

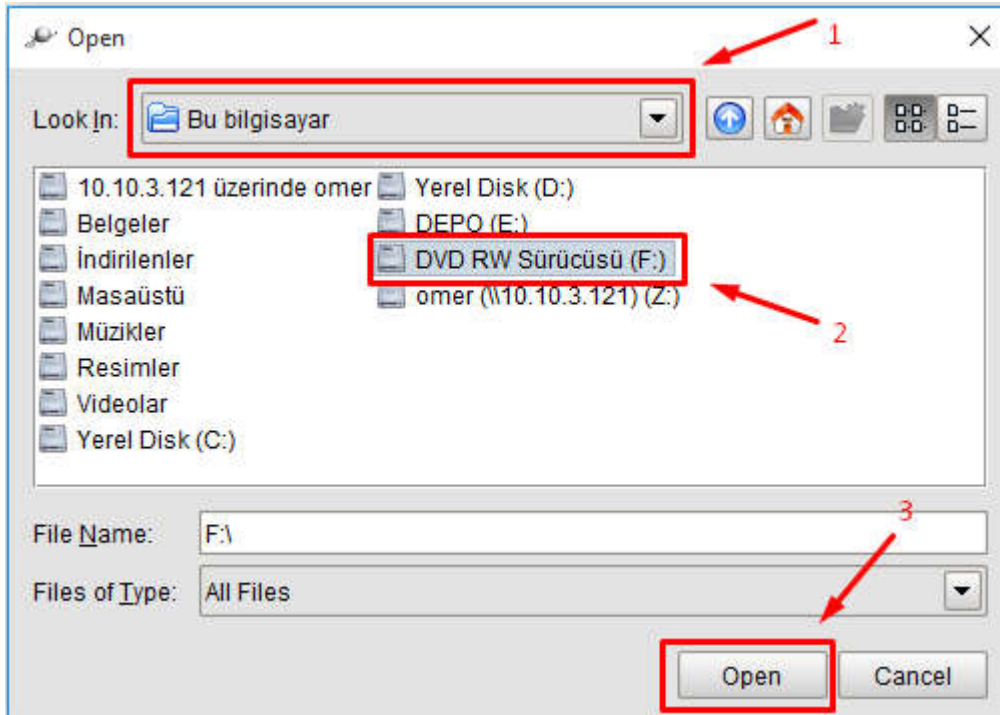


Okuma işlemini başlatmak için "Yükle" butonuna basılır.

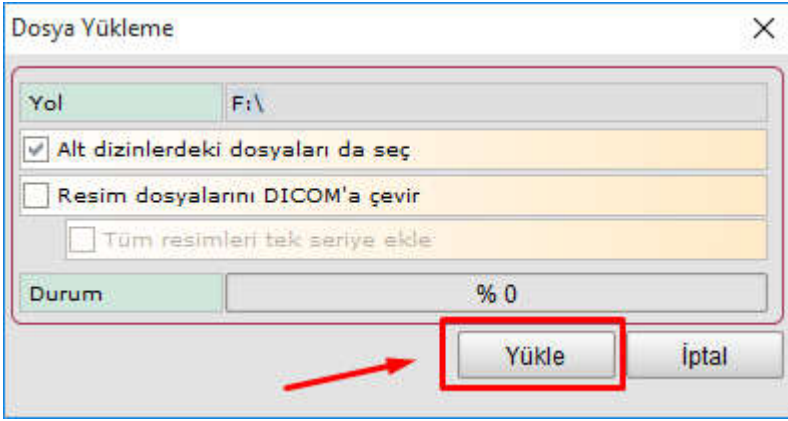



CD deki görüntüler okumaya başlayacaktır. Görüntülerin tamamının okunmasını beklememiz gerekiyor. İlerleme durumunu ekranın sol alt kısmındaki durum çubuğundan takip edebiliriz.

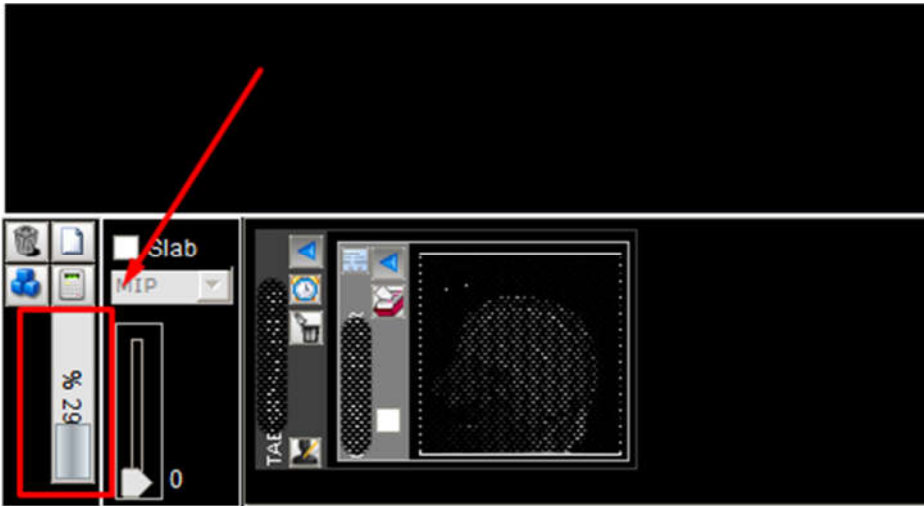

Okuma işlemi tamamlandıktan sonra durum çubuğu kaybolacaktır.

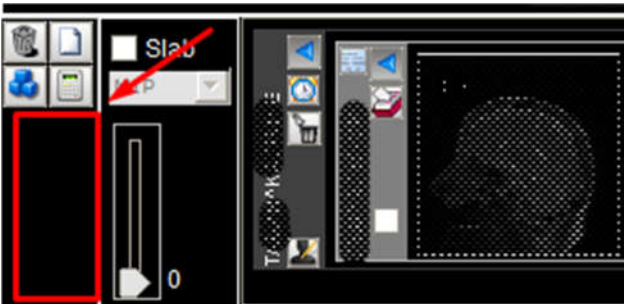

Hastanın görüntülerinden herhangi bir tanesi seçilip ekranın en üstünde yer alan menülerden “Dışa Aktar” menüsünden Seçme İşlemleri -> Hasta Seç yapılarak okunan hastanın görüntüleri seçilmiş olur.(NOT: Menü pasif ise görüntü seçilmemiştir.)

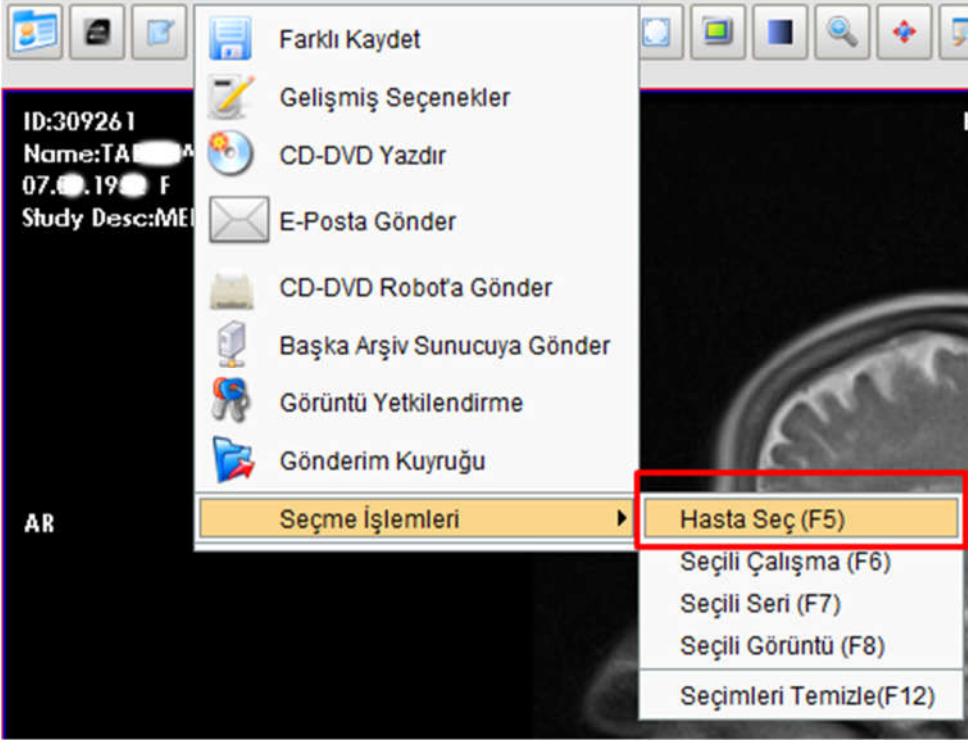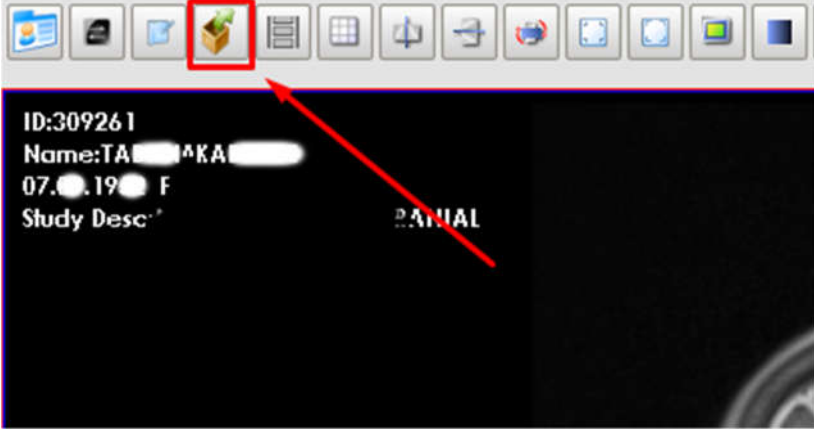


Bu işlemten sonra görüntünün sistemdeki hasta ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Burada her görüntünün sol üst tarafında yer alan “ID” sine dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer görüntüdeki “ID” HBYS deki dosya numarası ile aynı ise hasta eşleştirmesi sistem tarafından otomatik yapılmaktadır. Görüntülerin “ID” si dosya numarasından farklı ise hastanın, görüntüleri ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Eşleştirilmediği takdirde görüntüler sistemde gözükmeyecektir.


**DİKKAT:** Yüklenen CD nin hastaya ait olduğunun kontrolü yapılması gerekmektedir. Hastanın CD si yanlış çekilmiş olabilir. Bunun için “ID” ve “Name” alanlarının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Name alanı hastanın isminden farklı ise görüntü sunucuya kesinlikle gönderilmemelidir. Bu ve bunun gibi istisnai durumları otomasyon birimine bildirmeniz gerekmektedir.

**Görüntülerin Eşleştirilmesi:****(ID si Dosya Numarası ile aynı ise bu sayfayı atlayınız)**


Ekranın sol alt tarafında hasta isminin yazılı olduğu yerde profil resmine benzer resimde “Hasta Eşleştir” butonuna tıklanır.

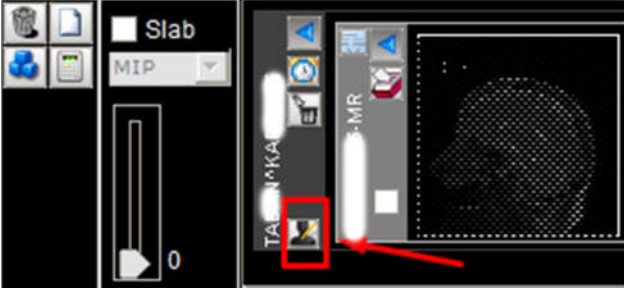

Karşımıza gelen ekranda hastanın HBYS deki dosya numarası yazılarak “Sorgula” butonuna basılır.

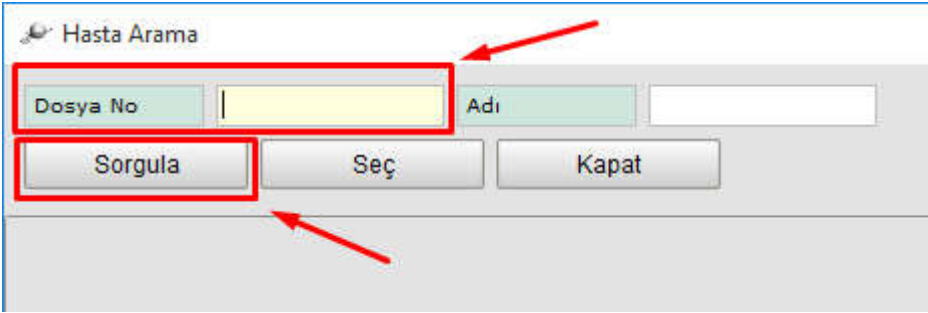

Gelen hasta adının görüntüdeki ile aynı olduğundan ve doğru dosya numarasının girildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde görüntüler başka bir hastanın dosyasına gidecektir.

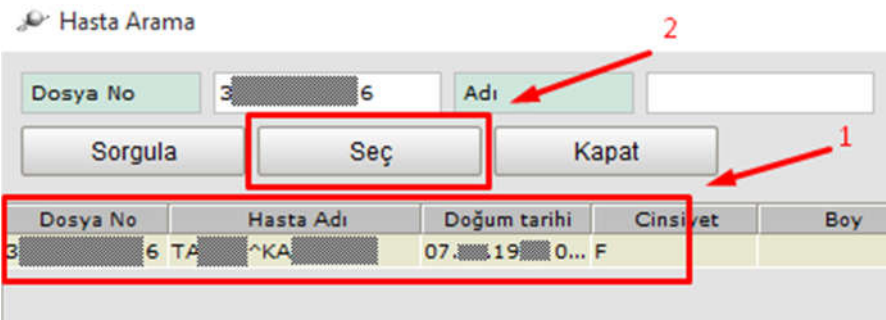


Dosya numarası girilip sorguladıktan sonra hasta kaydı gelmiyorsa kapat butonu tıklanır. Görüntülerin ID si ile hastanın dosya numarası not edilir, en son sunucuya yükleme işlemi bittikten sonra otomasyon birimine [bildirilmelidir](#). Aksi takdirde görüntüler sistemde gözükmeyecektir.




Hasta seçme işlemi yapıldıktan sonra ekranın üstünde yer alan “**Dışa Aktar**” menüsünden “**Başka Arşiv Sunucusuna**” Gönder tıklanır.



Karşımıza gelen ekrandan “**Kesinleşmiş Raporları RTF olarak ekle**” işaretlenir. Dikkat edilmesi gereken Hedef Nod: olarak “**Enlil PACS**” seçilmelidir. Aksi takdirde görüntüler gözükmeyecektir. Son bir kontrol olarak hastanın hangi görüntülerinin yükleneceğini sol üstteki alandan kontrol edebiliriz. Bütün seçimler doğru yapıldıktan sonra “**Gönder**” butonuna basılarak görüntüler sunucuya gönderilir.

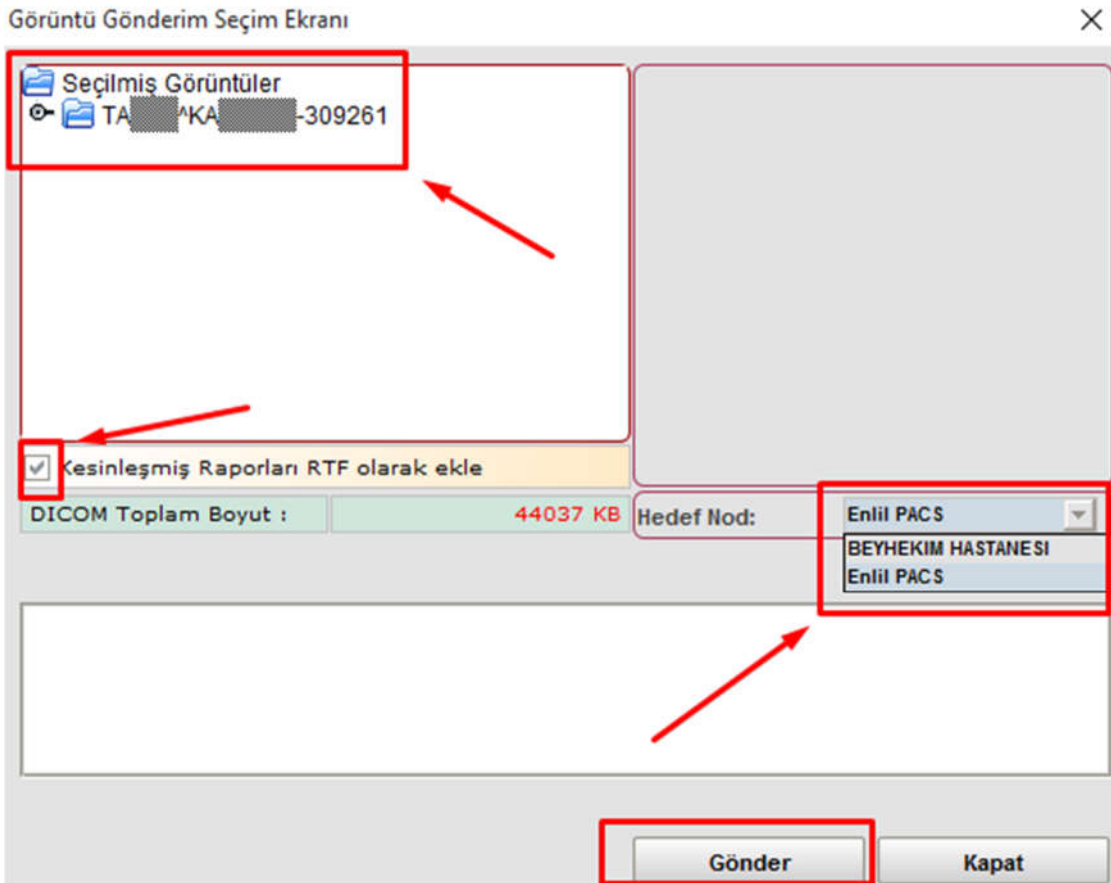

Görüntülerin sunucuya gönderilmesini beklememiz gerekmektedir. Gönderim kuyruğuna ekranın üst tarafındaki “**Dışa Aktar**” menüsünden “**Gönderim Kuyruğu**” tıklanarak erişilebilir.

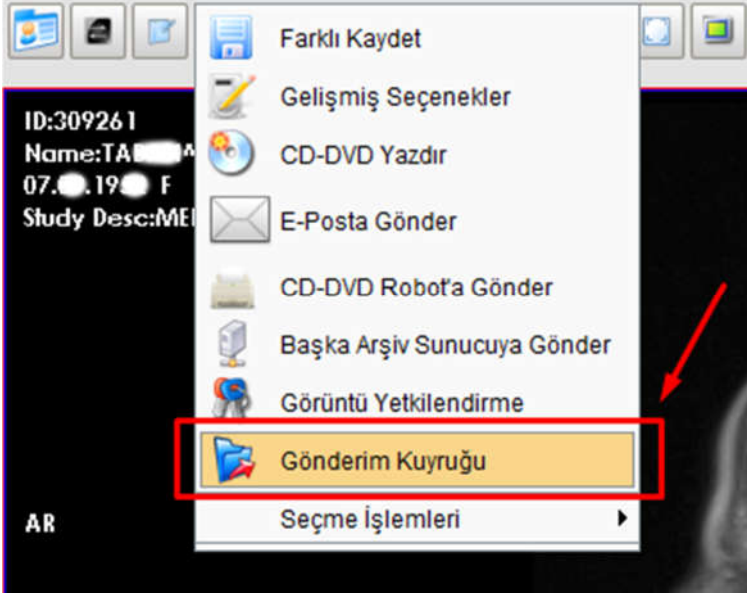

Gönderim kuyruğunda durum “**Bitti**” yazıyorsa görüntü sisteme atılmıştır. Atılan görüntü sayısını Başarılı sütunundan kontrol edebilirsiniz.

EnlilPACS - Gönderim Kuyruğu

| Durum | ID            | Hedef      | Başarılı | Hatalı | Toplam |
|-------|---------------|------------|----------|--------|--------|
| Bitti | 1478095072850 | Enlil PACS | 149      | 0      | 149    |
| Bitti | 1478095082407 | Enlil PACS | 149      | 0      | 149    |

Durdur Kapat