

Web tarayıcınızın (Chrome,Firefox,Internet Eplorer) adres çubuğuna **10.10.10.13:8080/pacs** yazılarak ilgili adrese gidilir.



Karşımıza gelen ekranda Uygulama Yükleme altındaki “EnliIPACS 1GB” seçilip “Yükle” butonu ile uygulama bilgisayara indirilir.

Enli PACS Uygulama Bileşenleri ve Eklentileri


Paket	Açıklama	Yükleme
Java Runtime	Java uygulamalarını çalıştırabilmek için gerekli JAVA kurulum paketi	<input type="button" value="Yükle"/>
Java Advanced Imaging	Görüntü işleme işlevlerini ve fonksiyonlarını hızlandırmak için gerekli JAVA eklentisi.	<input type="button" value="Yükle"/>
Java Image IO	Görüntü sıkıştırma/açma işlevleri için gerekli JAVA eklentisi.	<input type="button" value="Yükle"/>
Uygulama Yükleme		
Uygulama Seçimi	<input type="text" value="EnliIPACS 1 GB"/> Standart 1 GB RAM ile çalışan sürüm. Minimum sistem gereksinimi: 2 GB RAM, 1.6 GHz işlemci	<input type="button" value="Yükle"/>

www.enlil.com.tr



www.pacs.com.tr

NOT: Bilgisayara daha önce Java kurulumu gerçekleştirilmemiş ise “Java Runtime” in yüklenmesi gerekmektedir. Hasta CD dinde görüntüler gözüküyor yada şeklinde çıkıyorsa “Java Advanced Imaging” ve “Java Image IO” paketlerinin yüklenmesi gerekmektedir.

İndirme işlemi sırasında aşağıdaki gibi uyarı alınırsa “Sakla” seçeneği ile indirme işlemi devam ettirilir.

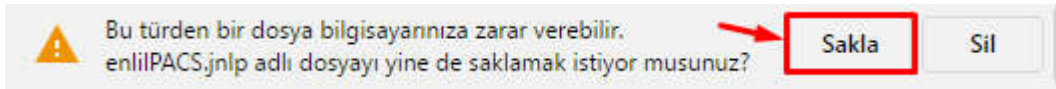

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra dosya üzerine tıklanarak kurulum başlatılır. Later seçeneği seçilerek kurulumu devam edilir.

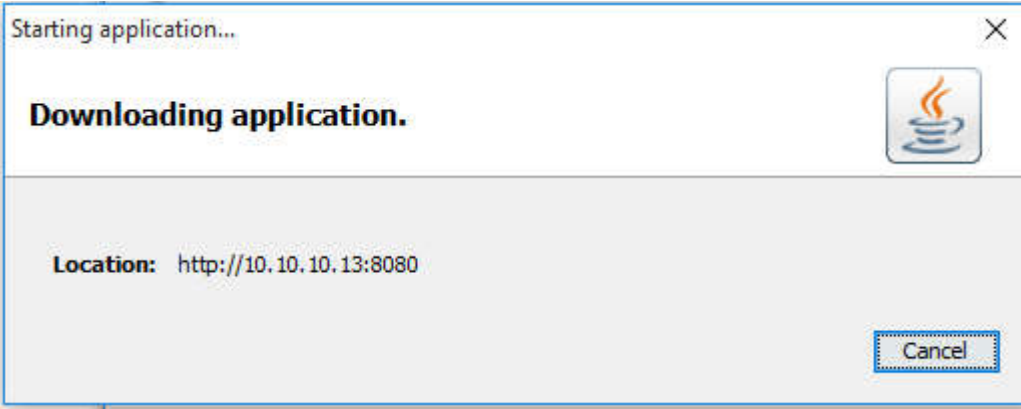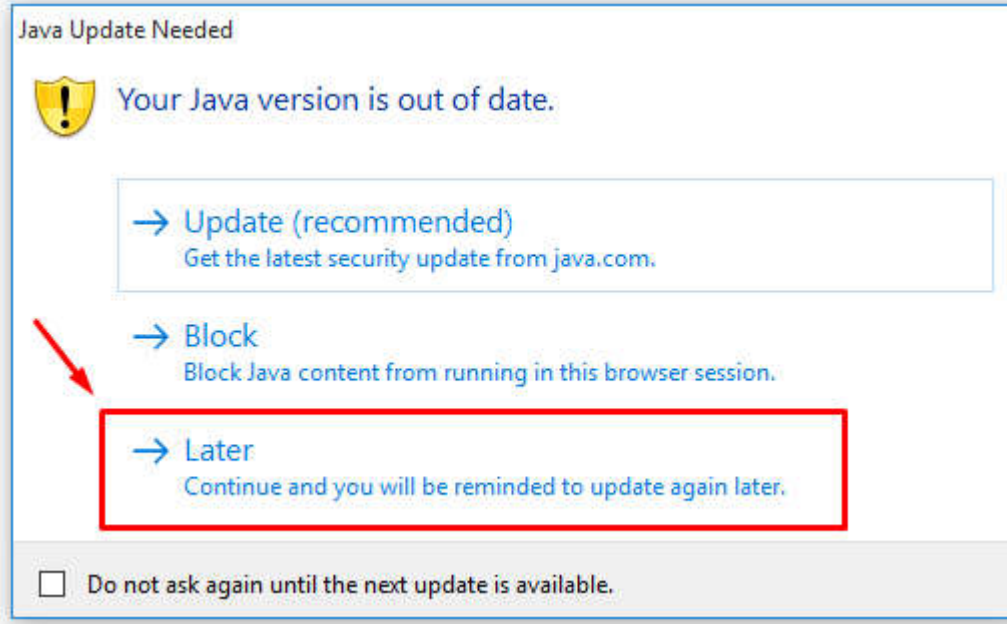

Kurulum tamamlandıktan sonra Enlil PACS otomatik olarak açılacaktır. Kısayolu masaüstüne atılmış ise kurulum başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

